	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
	USO DE MASCARA PFF2/N95		
	Código: POP.HC.SESMT.002	Versão: 003	Página: 1 de 3

FINALIDADE:

Entrega e controle de máscaras PFF2/N95 (Equipamento de Proteção Individual – EPI), nas dependências do Hospital do Centro, visando proporcionar condições de trabalho mais seguras para os profissionais expostos a ambientes contaminados por aerossóis ou em locais de isolamento de pacientes evitando o risco de acidentes com material biológico e proteger a saúde do Profissional, deverá ser trocada sempre que necessária pelos profissionais, o fornecimento deverá ser anotada na ficha de fornecimento de EPIs, de cada colaborador.

JUSTIFICATIVA:

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) se faz necessário com a finalidade de prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, oriundas da exposição a materiais biológicos.

O fornecimento das máscaras PFF2/N95, será feito pela farmácia de cada setor ou pelo seu coordenador responsável no período noturno, finais de semana e feriados para os turnos diurnos a entrega será feita de Segunda e sexta-feira na sala do SESMT. Os profissionais deverão assinar a ficha de controle de fornecimento de EPI's que serão entregues ao SESMT.

DEFINIÇÕES E SIGLAS:

EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:


Todos os Profissionais de saúde que atuem nas unidades UTIs, (Unidade de terapia intensiva), com leitos de isolamento.

MATERIAL NECESSÁRIO:

MASCARA PFF2/N95

PROCEDIMENTO:

- 1-Higienize as mãos,
- 2- Abra a máscara,
- 3- Com o clipe nasal voltado para frente, passe o elástico de cima pela cabeça posicionando atrás do pescoço em cima da orelha. Após passe o outro elástico e posicione abaixo da orelha.
- 4- Acerte o respirador na face, para que os elásticos não fiquem torcidos e com as duas mãos acerte a tira metálica sobre o nariz.
- 5- Teste de selagem: Com as duas mãos em concha, cubra o máximo à superfície do respirador sem comprimi-lo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
	USO DE MASCARA PFF2/N95		
	Código: POP.HC.SESMT.002	Versão: 003	Página: 2 de 3

contra a face e exale fortemente, o ar não devera vaziar pelas laterais.

- 6- Se identificar deficiência na vedação, ajuste novamente o respirador sobre a face:
 - Segure a presilha apoiando com o dedo indicador em sua extremidade e com a outra mão puxe os elásticos.
 - Após o ajuste, flexione-as para distribuir as tensões adequadamente e repita o teste de selagem.

Instrução de remoção:

- Retire o elástico superior passando-a pela cabeça em seguida a inferior.
- Faça a remoção sem tocar a parte externa,
- Coloque dentro de um saco plástico limpo e seco (faça pequenos furos). Descartar o saco plástico e utilizar um novo para próxima guarda.
- Guardar em local apropriado para este fim.
- Indicada para uso de até sete dias desde que esteja integra.
- Inspeção visualmente a máscara PFF2/N95 para determinar se sua integridade foi comprometida (máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos não podem ser utilizadas).
- Verifique se componentes como tiras, ponte nasal e material de espuma nasal não se degradaram, o que pode afetar a qualidade do ajuste e a vedação e, portanto, a eficácia da máscara.
- Se a integridade de qualquer parte da máscara estiver comprometida ou se uma verificação bem-sucedida do selo do usuário não puder ser realizada, descarte a máscara
- Sua utilização por pessoas com uso de barba não é recomendada, pois sua vedação poderá ser comprometida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Informações Extraídas da Norma Regulamentadora NR06.

HISTÓRICO DE REVISÕES:

24/04/2023 – revisão dos procedimentos;

03/06/2024 – revisão de procedimentos;

