	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		
	DESINFECÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		
	Código: POP.HC.CC.013	Versão: 002	Página: 1 de 2

FINALIDADE:

Reduzir os microrganismos que se encontra nas superfícies dos equipamentos hospitalar.

JUSTIFICATIVA:

Após cada procedimento e ao início e término do plantão é realizado a desinfecção dos equipamentos do centro cirúrgico sempre utilizando EPI's como: luvas de procedimento, máscara e óculos para a segurança do colaborador.

DEFINIÇÕES E SIGLAS:

EPI's – Equipamentos de Proteção Individual

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Enfermeiro / Técnico de enfermagem / Auxiliar de enfermagem

MATERIAL NECESSÁRIO:

- Desinfetante Peróxido Hospitalar
- Compressa não estéril;
- Álcool 70%;
- Luvas de procedimento;
- Máscara;
- Óculos de proteção;

PROCEDIMENTO:

A desinfecção deve ser realizada diariamente entre um procedimento e outro;

Deve ser realizada também ao início e término do plantão;


Deve ser realizada utilizando o desinfetante peróxido hospitalar, com auxílio de perflex;

Ao realizar a desinfecção, zelar para não danificar os equipamentos;

Ao término da desinfecção embalar o material e guardar;

Higienizar as mãos;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		
	DESINFECÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		
	Código: POP.HC.CC.013	Versão: 002	Página: 2 de 2

fernandes.com.br/esterilizacao-vs-desinfeccao-de-materiais-cirurgicos-qual-as-diferencas/
HISTÓRICO DE REVISÕES:
20/02/2024 - Atualizado e revisado

