

FINALIDADE:

Orientar sobre limpeza e desinfecção das luvas após a utilização e antes de ser guardada.

JUSTIFICATIVA:

O processo garante redução da carga microbiana, proporcionando qualidade de reutilização do EPI.

DEFINIÇÕES E SIGLAS:

EPI (Equipamento de proteção individual)

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

- Auxiliar de Serviços Gerais

MATERIAL

- FLEX Desinfetante Peróxido 40B Desinfetante hospitalar para todas as superfícies.
- Prático 100 Cloreto de Alquil Dimetil, Benzil Amonio, (cloreto de benzalcônio) 5.2% PHMB (polihexamelíteno biguanida) 3.5% Tensoativo não iônico, solvente e água.
- HIDRO FILL 300 limpador de uso geral neutro.
- Limpa e desinfeta pisos e superfícies em geral.

PROCEDIMENTO:

A limpeza e desinfecção das luvas deve ser realizada após realização do procedimento de limpeza, antes de guardar em armário específico.

PROCEDIMENTO PASSO A PASSO HIGIENE DAS LUVAS

- Manter posição confortável próximo a pia, sem encostar;
- Com as mãos enluvadas;
- Abrir a torneira e molhar as luvas, evitando encostar-se à pia;
- Aplicar na palma da mão enluvada quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das luvas;
- Ensaboar as palmas das mãos enluvadas, friccionando-as entre si;
- Esfregar a palma enluvada da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa;
- Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais;
- Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa;

- Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa;
- Friccionar as polpas digitais e esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa;
- Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa;
- Enxaguar as mãos enluvadas, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato direto das mãos enluvadas e ensaboadas com a torneira;
- Secar as mãos enluvadas com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos.
- Obs: No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha;
- Desprezar o papel toalha na lixeira

PROCEDIMENTO PASSO A PASSO DESINFECÇÃO DAS LUVAS

- Aplicar na palma da mão enluvada quantidade suficiente de desinfetante hospitalar (peróxido) ou álcool em gel para cobrir todas as superfícies das mãos;
- Friccionar as palmas das mãos enluvadas, entre si;
- Esfregar a palma enluvada da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa;
- Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais;
- Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa;
- Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa;
- Friccionar as polpas digitais e esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa;
- Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa;
- Deixar secar naturalmente;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

HISTÓRICO DE REVISÕES:

20/02/2024 - Atualizado e revisado