 <p>HOSPITAL DO CENTRO <i>Sempre cuidando de você!</i></p>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
	PROTOCOLO DE TESTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO DESFIBRILADOR		
	Código: POP.HC.ENF.034	Versão: 002	Página: 1 de 2

FINALIDADE:

Verificação do funcionamento do desfibrilador diariamente.

JUSTIFICATIVA:

Garantir a limpeza e desinfecção de cabos e pás do desfibrilador e deixar preparado após cada uso.

DEFINIÇÕES E SIGLAS:

Não aplica.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:


Enfermeiro/Técnico de Enfermagem/Auxiliar de Enfermagem.

MATERIAL NECESSÁRIO:

- Desfibrilador;
- Impresso para registro;
- Caneta.

PROCEDIMENTO:

Profissional	Descrição
<p>ENFERMEIRO</p> <p>TÉCNICO DE ENFERMAGEM</p> <p>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certifique-se da responsabilidade do profissional de enfermagem em testar o desfibrilador no turno; 2. Higienize as mãos; 3. Verifique se o cabo de energia está ligado na tomada e se há um "X" na tela esquerda piscando que indica ligado; 4. Desligue o cabo de energia e verifique o acionamento da bateria, se positivo coloque na tomada novamente; 5. Ligue o desfibrilador girando o botão para desfibrilação manual; 6. Siga as instruções de acordo com o fabricante, retire as pás; 7. Selecione uma carga baixa, clicando no botão de seleção "-" menos; 8. Posiciona as pás na base de teste, na haste metálica; 9. Dê a carga no aparelho; 10. Perceba sinal sonoro ou visual indicando o disparo da carga e a mensagem de choque aplicado; 11. Coloque as pás nos locais de encaixe; 12. Desligue o desfibrilador girando o botão para a posição DESLIGA; 13. Deixe o desfibrilador limpo e organizado; 14. Higienize as mãos; 15. Registre o teste realizado.

 <p>HOSPITAL DO CENTRO <i>Sempre cuidando de você!</i></p>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
	PROTOCOLO DE TESTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO DESFIBRILADOR		
	Código: POP.HC.ENF.034	Versão: 002	Página: 2 de 2

OBSERVAÇÕES

Em caso de não conformidade durante o teste:

- Verifique se o cabo de energia está mal adaptado à tomada;
- Verifique se as pás estão mal encaixadas no local destinado a elas;
- Na persistência do problema solicite à engenharia clínica a manutenção do aparelho com defeito imediatamente e informe e à chefia de enfermagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

Não se aplica.

HISTÓRICO DE REVISÕES:

20/02/2024 - Atualizado e revisado