

 <p>HOSPITAL DO CENTRO <i>Sempre cuidando de você!</i></p>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
	PROTOCOLO DE TESTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO		
	Código: POP.HC.ENF.035	Versão: 002	Página: 1 de 3

FINALIDADE:

Verificação do funcionamento do laringoscópio diariamente.

JUSTIFICATIVA:

Garantir a limpeza e desinfecção de cabos e lâminas de laringoscópio após cada uso.

DEFINIÇÕES E SIGLAS:

Remover sujidades;
 Reduzir carga microbiana;
 Prevenir infecções relacionadas a assistência à saúde;
 Testar funcionalidade.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Enfermeiro/Técnico de Enfermagem/Auxiliar de Enfermagem.

MATERIAL NECESSÁRIO:

Para teste:

- Luvas de procedimento;
- Lâmina e cabo do laringoscópio;
- 2 pilhas médias comuns.

Para limpeza e desinfecção:

- EPIs (luvas de procedimento, óculos e máscara);
- Água;
- Sabão;
- Álcool a 70%;
- Gaze estéril.

PROCEDIMENTO:

Profissional	Descrição
ENFERMEIRO	TESTE <ol style="list-style-type: none"> 1. Higienize as mãos; 2. Calce as luvas de procedimento; 3. Verifique a presença das duas peças do laringoscópio (lâmina e cabo); 4. Coloque as pilhas no compartimento do cabo, certificando de que estão do lado correto e feche a tampa; 5. Encaixe firmemente a lâmina do laringoscópio ao cabo de pé; 6. Puxe a lâmina para cima encaixando-a; 7. Certifique que a luz que está na lâmina acenda ao encaixá-la no cabo; 8. Após confirmar o funcionamento, desencaixe as duas partes; 9. Teste com todas as lâminas;

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

AUXILIAR DE
ENFERMAGEM

10. Guarde-as junto ao equipamento de intubação traqueal;

11. Retire as luvas de procedimento;

12. Higienize as mãos;

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

1. Higienize as mãos;

2. Coloque óculos, máscara e calce as luvas de procedimento;

3. Desmonte todo o conjunto do laringoscópio e retire as pilhas;

4. Limpe o cabo do laringoscópio com gaze umedecida em água e sabão;

5. Remova o sabão com gaze umedecida em água;

6. Seque o cabo com gaze seca;

7. Friccione com álcool a 70% no cabo por 20 a 30 segundos;

8. Limpe a lâmina do laringoscópio com gaze umedecida em água e sabão;

9. Enxágue abundantemente com água corrente;

10. Seque a lâmina com gaze seca sem deixar umidade ao redor da lâmpada;

11. Umedeça uma gaze com álcool a 70% e friccione na lâmina por 20 a 30 segundos;

12. Monte o laringoscópio, teste o seu funcionamento e certifique-se que não há sujidade ou umidade;

13. Guarde o laringoscópio protegido em saco plástico no local correto do carrinho de emergência;

14. Retire as luvas, óculos e máscara e descarte os resíduos em local apropriado;

15. Higienize as mãos.

OBSERVAÇÕES

- Sempre deixar duas pilhas novas de reserva no carro de emergência;
- Este material deve ter seu funcionamento testado em cada plantão pelos profissionais de enfermagem;
- Durante o teste de funcionamento do laringoscópio, se a luz não acender, confira o contato e/ou troque as pilhas do cabo. Se o problema persistir, encaminhe à Engenharia Clínica para conserto e comunique à chefia do setor;
- O registro do teste de funcionamento do laringoscópio deverá ser registrado na Planilha de materiais de emergência;
- Deve-se fazer a limpeza e desinfecção do laringoscópio a cada uso do mesmo;
- O laringoscópio não pode ser deixado imerso em soluções;
- O procedimento de limpeza e desinfecção do laringoscópio deve ser realizado no expurgo;
- O registro da limpeza do laringoscópio deve ser feito na Planilha de materiais de emergência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Manual de Limpeza e Desinfecção da ANVISA, 2010.
2. Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização em Unidades de Saúde. 2006.
3. ANVISA. Orientações para prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, 2009.

 HOSPITAL DO CENTRO <i>Sempre cuidando de você!</i>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
	PROTOCOLO DE TESTE, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO		
	Código: POP.HC.ENF.035	Versão: 002	Página: 3 de 3

HISTÓRICO DE REVISÕES:
20/02/2024 - Atualizado e revisado

