	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
	PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA GELADEIRA		
	Código: POP.HC.ENF.038	Versão: 002	Página: 1 de 2

FINALIDADE:

Manutenção da higiene da geladeira.

JUSTIFICATIVA:

Realizar a limpeza, desinfecção e organização da geladeira de medicamentos de forma segura, reduzindo as sujidades, de forma a garantir a qualidade dos medicamentos nela armazenados, visando reduzir a transmissão de infecções, proteger a estabilidade do produto farmacêutico, o ambiente e todas as pessoas envolvidas no processo.

DEFINIÇÕES E SIGLAS:

Não se aplica.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Enfermeiro/Técnico de Enfermagem/Auxiliar de Enfermagem.

MATERIAL NECESSÁRIO:


- Pano limpo;
- Álcool 70%.

PROCEDIMENTO:

Profissional	Descrição
ENFERMEIRO	1. Programe o dia de limpeza da geladeira de acordo com o turno;
	2. Higienize as mãos;
	3. Retire os medicamentos e guarde em outra geladeira;
	4. Retire o termômetro;
	5. Anote na passagem de plantão;
	6. Desligue a geladeira;
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	7. Após o degelo, retire o excesso de água;
	8. Limpe internamente com álcool 70%, incluindo a borracha da porta e os puxadores;
	9. Troque o pano;
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	10. Limpe externamente com álcool 70%;
	11. Instale o termômetro, religue a geladeira e aguarde alcançar a temperatura adequada (2 a 8° C);
	12. Higienize as mãos;
	13. Retorne os medicamentos na geladeira;
	14. Registre no impresso próprio a data da limpeza, assine e carimbe.

OBSERVAÇÕES

- A limpeza da geladeira deve ser feita a cada 15 dias, planejada de acordo com o turno e deve ser preenchida a

 <p>HOSPITAL DO CENTRO <i>Sempre cuidando de você!</i></p>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
	PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA GELADEIRA		
	Código: POP.HC.ENF.038	Versão: 002	Página: 2 de 2

Planilha de Controle de Limpeza da Geladeira;

- A efetivação da limpeza da geladeira com a frequência necessária é de responsabilidade do enfermeiro, que determinará dia/período da limpeza, porém poderá delegar para a equipe de enfermagem;
- Verificar a temperatura da geladeira antes de guardar as medicações;
- Os medicamentos não devem ser colocados dentro de caixa de isopor ou na porta da geladeira;
- Após o término do preenchimento do impresso, Controle de Limpeza da Geladeira, o mesmo deve ser guardado por um período de três meses.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/erros_de_medicao-definicoes_e_estrategias_de_prevencao.pdf
2. BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Manual de Limpeza e Desinfecção da ANVISA, 2010

HISTÓRICO DE REVISÕES:

20/02/2024 - Atualizado e revisado