	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		
	PREPARO E CONTROLE DE GLUTARALDEIDO		
	Código: POP.HC.ENF.064	Versão: 002	Página: 1 de 2

**FINALIDADE:**

Realizar preparo e controle diário do agente desinfetante, a fim de garantir a desinfecção de alto nível do equipamento endoscópicos (endoscópio, colonoscópio, fibrobroncoscopio).

**JUSTIFICATIVA:**

Desinfetar sob imersão os equipamentos endoscópicos entre procedimento e ao final do turno.

**DEFINIÇÕES E SIGLAS:**
**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem e equipe multiprofissional

**MATERIAL NECESSÁRIO:**

Glutaraldeido

Recipiente plástico com tampa, sendo 1 para cada tipo de equipamento;

Tira de controle de ação

Folha de registo


Inativador

**PROCEDIMENTO:**
**Preparo da Solução**

- Colocar EPI's (máscara, óculos e luvas de procedimento);
- A solução vem pronto uso, não deve ser diluída;
- Colocar a solução de Glutaraldeído no recipiente plástico com tampa, em quantidade suficiente até a cobertura total do equipamento;
- Realizar teste de controle de atividade do glutaraldeído e registrar em formulário de controle diário;
- Anotar em etiqueta data do preparo, data de validade, hora e responsável pelo preparo da solução;
- Conforme orientação do fabricante o produto tem validade de 30 dias após aberto;
- Após 30 dias ou se teste de controle de atividade Não Conforme o produto deverá ser inativado e descartado.

**Realização de teste**

- Realizar o teste no início do dia de atendimento;
- Colocar EPI's (máscara, óculos e luvas de procedimento);
- Pegar tira de teste;
- Submergir a tira em solução de glutaraldeído por 5 segundos;
- Realizar a leitura conforme legenda do frasco;
- Registrar em formulário de controle diário;
- Se Aprovado iniciar desinfecção dos equipamentos, se Não Aprovado inativar a solução e descartar;

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b>		
	<b>PREPARO E CONTROLE DE GLUTARALDEIDO</b>		
	Código: POP.HC.ENF.064	Versão: 002	Página: 2 de 2

#### **Descarte da Solução**

- Inativar a solução;
- Colocar pó inativador dentro da solução, mexer por 2 minutos ou até a completa diluição do pó;
- Desprezar em pia;

#### **REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIA**

Ficha técnica do produto

#### **HISTÓRICO DE REVISÕES:**

20/02/2024 - Atualizado e Revisado