	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO MANUAL DO EQUIPAMENTO ENDOSCÓPICO		
	Código: POP.HC.ENF.065	Versão: 002	Página: 1 de 2

**FINALIDADE:**

Padronizar a limpeza do equipamento endoscópicos (endoscópio, colonoscópio, fibrobroncoscopio), remover todo e qualquer tipo de sujidade visível.

**JUSTIFICATIVA:**

Reduzir a contaminação microbiana, assegurando a limpeza do equipamento para processo de desinfecção de alto nível adequado

**DEFINIÇÕES E SIGLAS:**
**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**


Enfermeiro e Técnico de Enfermagem e equipe multiprofissional

**MATERIAL NECESSÁRIO:**

Detergente enzimático  
Escovas  
Glutaraldeído  
Recipiente plástico com tampa, sendo 1 para cada tipo de equipamento;  
EPI's (avental impermeável, máscara, óculos e luva de PVC)  
Ar comprimido  
Compressas

**PROCEDIMENTO:**

- Higienizar as mãos antes e após cada procedimento;
- Paramentar-se com os EPI's;
- Usar o avental impermeável em todo processo de lavagem manual;
- Realizar limpeza d recipiente plástico com álcool 70% e compressa limpa;
- Diluir o detergente enzimático conforme orientação do fabricante e despejar o volume adequado na cuba inox com água potável, uniformizando a solução;
- Desmontar e desconectar peças removíveis, proceder imersão total do material;
- Cronometrar o tempo a partir da imersão de 5 minutos;
- Após retirar o material, utilizar escovas e/ou esponjas não abrasivas para retirada da sujidade por completo;
- Enxaguar com bastante água corrente e abundante;
- Colocar o equipamento endoscópico sob um campo limpo para secar;
- Submergir o equipamento endoscópico em solução de glutaraldeído por 10 minutos conforme orientação do fabricante;
- Enxaguar com bastante água corrente e abundante;
- Utilizar ar comprimido e/ou campo limpo para secar todo o material;
- Registrar em formulário de registro de limpeza e desinfecção o tempo de contato e número do equipamento;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP		
	LIMPEZA E DESINFECÇÃO MANUAL DO EQUIPAMENTO ENDOSCOPICO		
	Código: POP.HC.ENF.065	Versão: 002	Página: 2 de 2

- Entregar o equipamento para o médico ou guardar em armário específico;
- Retirar os EPI's e
- Higienizar as mãos.

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIA

Ficha técnica do produto

SOBEEG – Sociedade Brasileira de Enfermagem em Endoscopia gastrointestinal - Manual de Limpeza e desinfecção de aparelhos endoscópicos - 2005

#### HISTÓRICO DE REVISÕES:

20/02/2024 - Atualizado e Revisado